





Brugsanvisning:

med.lux Pen / Cliplight LED / KaWe DIALIGHT XL /

diagnostisk lommelygte, hvid / Diagnosticeringslampe, LED

Kære kunde, tak for Deres valg af et KaWe-produkt. Vores produkter udmærkes af høj kvalitet og holdbarhed. Dette KaWe-produkt er i overensstemmelse med EU reglement (EU) 2017/745 (European Medical Device Regulation) og er i henhold til denne reglement klassificeret som et Klasse I medicinsk udstyr.



Før De begynder at bruge produktet bedes De læse brugsanvisningen omhyggeligt og fuldstændigt og følge vejledningens plejeregler. Inden brug skal vejledningen læses og forstås helt og holdent.

Gem disse instruktioner til fremtidig reference og for at en efterfølgende bruger af instrumentet kunne også få nytte af dem.

Anvendelse:

Den diagnostiske lommelygte må kun bruges af certificerede teknikere.

Patient målgruppe: alle

Beskrivelse af hensigtsmæssig anvendelse:


Det er et diagnostisk værktøj, designet til at belyse områder af interesse, såsom mundhulen og hudoverflade.

Modellerne "Cliplight LED", "Diagnostic Light, LED" og "med.lux Pen" er testet i henhold til EN 62471 og er desuden velegnet til korte øjenundersøgelser (pupilrefleks).


Brugsanvisning:

med.lux Pen: Før du går i gang må isoleringsplasten mellem batteriet og kontaktfladen fjernes. Tænd/sluk sker ved at trykke på en knap placeret for enden af klemmen.


For at udskifte batterierne skrues metal pæreholder af.

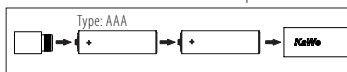

Cliplight LED: Tændes ved at trykke på clipsen så den kommer i kontakt med metalringen på huset. For at udskifte batterierne skrues metal pæreholder af.

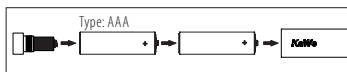


KaWe DIALIGHT XL: Tændes/slukkes ved at skubbe skydekontakten. For at udskifte lampen eller batterierne skrues hættten på håndtaget af.

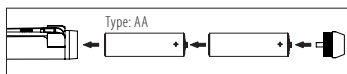

Diagnostisk lommelygte, hvid og

Diagnosticeringslampe, LED: Tændes/slukkes ved at trykke på tænd/sluk-knappen for enden af klemmen. For at udskifte lampen eller batteriet skal du skruer clipsen af.

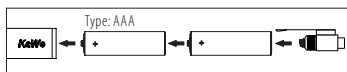

Brugsvarighed: Modellerne „DIALIGHT XL“ og „Diagnostisk lommelygte, hvid“ er beregnet til periodisk brug i højst 1 min. ad gangen med 10 minutters pauser mellem tændinger.

Uhensigtsmæssig brug / Kontraindikationer til brug af produkter:

Enhver anden brug eller anvendelse end den, der er angivet i denne vejledning, anses for at være uhensigtsmæssig. Producenten er fri for enhver ansvar for skader som følge af uhensigtsmæssig brug af produktet.

„DIALIGHT XL diagnostiske lommelygter“ og „diagnostisk lommelygte, hvid“ skal ikke anvendes til diagnostiske øjenundersøgelser.



Advarsler:

- Produkter med synlige skader skal slet ikke bruges.
- Lampen kan gå i stykker, hvis produktet falder på gulvet.
- Dyp aldrig diagnostisk lommelygte i væske.
- Undgå direkte kontakt af den diagnostiske lommelygte med tungen eller slimhinderne.
- Produktet må ikke bruges i et område med stærkt magnetisk felt (MRI).
- Brug ikke produktet i brand- eller eksplosiv atmosfære (f.eks. i rum indeholdende ilt eller bedøvelsesmidler).
- Diagnostiske lommelygter, som alle elektriske diagnostiske enheder, er underlagt særlige sikkerhedsregler vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet.
- Brug kun originale reservedele og tilbehør fra KaWe.



Lyset fra disse enheder er potentielt skadeligt. Risikoen for øjenskader stiger med stigende eksponeringstid. Varigheden af eksponering for disse enheder ved en maksimal intensitet på mere end 7,6 timer fører til en overskridelse af den vejledende fareværdi.



En defekt lygte kan være årsag til kraftig varmeopbygning, som kan medføre risiko for forbrændinger. I tilfælde af stærk opvarmning skal lygten straks slukkes og tages ud af brug.

Specifikationer:

Arbejdsafstand:	15 cm
Risikogruppe i henhold til ISO 15004-2:	2*
Klassificering i henhold til 62471	fri gruppe*

*gælder kun "Cliplight LED", "Diagnostic Light, LED" og "med.lux Pen" modeller

For en grafisk repræsentation af den relative spektrale fordeling (305 – 1100 nm) ved maksimal lysintensitet og maksimal blænde, kontakt venligst producenten (adresse se på bagsiden).

Genbrugsrestriktioner:

Der er ingen særlige krav. Levetiden bestemmes generelt af slid og ælde som følge af brug. Vi anbefaler, at levere lygten til genbrugsstation så hurtigt som muligt efter at den er taget ud af brug.

Opbevaring og transport:

Produktet lagres og transporteres beskyttet mod støv, fugt og forurening.

Driftstemperatur:

Under drift: fra +10 °C til 35 °C

Lagring: fra -10 °C til +45 °C

Under transport: fra -20 °C til +50 °C

Relativ luftfugtighed:

30 % til 75 %

Rengøring:

Rengøring af lampens overflade udføres med våd eller tør rengøringsmiddel.

Desinfektion:

Lampenes overflade kan desinficeres med en klud, fugtet af sprit.

Sterilisering:

Produktsterilisering er ikke mulig.

Kontrol og check af produktet før brug:

Før hver brug skal diagnostiske lommelygter kontrolleres for at sikre, at de fungerer korrekt. Brug aldrig produktet, hvis det er beskadiget.

Sørg for, at produktets bevægelige dele er forsvarligt fastgjort.

Bortskaffelse:

Produktet bortskaffes på et anvist indsamlingssted af elektrisk og elektronisk udstyr.

Generelle komponenter:

Detaljeret oplysninger om disse produkter kan findes på vores hjemmeside: www.kawemed.com

Producent:

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG
Eberhardstraße 56 | DE-71679 Asperg

Kontakt med producenten:

Du kan kontakte os via din forhandlers adresse eller telefon, samt telefonere: +49 7141 68188-0.

Base UDI-DI:

4030155KaWe1202Z7

Note til brugere og patienter

Alle alvorlige hændelser, der involverer dette produkt, skal straks rapporteres til producenten og til kompetente myndigheder i den relevante medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten befinder sig.

Garanti:

Ved hensigtsmæssig brug når brugsanvisningen er fulgt er garantiperioden to år fra salgsdatoen (ekskl. glødepærer/genopladelige batterier). Hvis du har andre spørgsmål eller har brug for reparation, bedes du kontakte din forhandler.

Forklaring af symboler:



Sikkerhedsinstruktioner eller advarsler



Varenummer



Serienummer, batch



Producent og fremstillingsdato



Overhold brugsanvisningen



Opbevares på et tørt sted



CE-overensstemmelsesmærke



Separat indsamling af elektrisk/elektronisk udstyr og brugte batterier



Medicinsk produkt



UDI-bærer



KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG
Eberhardstraße 56
71679 Asperg, Germany

Phone: +49 7141 68188-0
Fax: +49 7141 68188-11
e-mail: info@kawemed.de

www.kawemed.com

QM-1-124P-DK / B-24600 / 2023-08