



Navodila za uporabo

MEDIZINTECHNIK
seit 1890

KaWe

Zecken-Fix







Navodila za uporabo

Pinceta za odstranjevanje klopov „Zecken-Fix“ 4



Navodila za uporabo Pinceta za odstranjevanje klopov „Zecken-Fix“

Spoštovana stranka, zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka KaWe. Naši izdelki so visoke kvalitete in vzdržljivosti. Ta izdelek podjetja KaWe je skladen z določbami Uredba (EU) 2017/745 (Evropska direktiva o medicinskih pripomočkih) in je v skladu s to direktivo razvrščen kot medicinski izdelek razreda I.



Prosimo, da pred uporabo natančno preberete celotno besedilo teh navodil za uporabo in upoštevate navodila za nego.

Prosimo, upoštevajte: pinceto za odstranjevanje klopov Zecken-Fix smete uporabljati le v skladu s temi navodili za uporabo. Pred uporabo upoštevajte navodila za ponovno obdelavo pincete za odstranjevanje klopov. Po odstranitvi klopa je treba mesto ugriza takoj razkužiti, v vsakem primeru pa preventivno obiskati zdravnika. Odstranitev klopa ne ščiti pred strupenimi patogeni.

Uporabnik: zdravstveno osebje in nestrokovnjaki (samo odrasli!).

Ciljna skupina bolnikov: ljudje in živali

Namen: pinceta za uporabo na ljudeh in živalih za odstranjevanje klopov.

Storitev:

Usmerjenost konic pincete: pinceta za odstranjevanje klopov je pripomoček, ki olajša odstranjevanje klopov s kože. Zasnova pincete Kirchner & Wilhelm omogoča enostavno prilagajanje položaja konic pincete, kar vsakemu uporabniku omogoča, da prilagodi pinceto svoji individualni tehniki nanašanja. Ta razlika v položaju konic pincete je še posebej priročna, ko pinceto približate koži pod rahlim kotom.

1.



2.



3.



Preden začnete odstranjevati klopa, podstavite eno stran pincete pod klopa. V tem primeru je orodje bolj priročno uporabljati, če so konice rahlo zamaknjene glede na drugo. Če klopa lahko primemo le od zgoraj, ni potrebe po premiku. Upoštevajte, da je položaj konice pincete Kirchner & Wilhelm mogoče poljubno nastaviti. Individualna prilagoditev se izvede z navadnimi kleščami.

Odstranjevanje klopa: prej ko klopa odstranimo, manjše je tveganje za prenos virusov in bakterij.

Slika 1



Pinceto Zecken-Fix primite za črn ročaj in jo položite med palec in sredinec. Postavite kazalec (iste roke) na obročasti konec kovinskega ročaja in povlecite obroč proti sebi, da razširite kleščasti ročaj.

Slika 2



S konicami pincete primite klopa čim bližje koži, kazalec pa počasi spuščajte. **Ob tem pazite, da ne zmečkate klopa!** Zdaj počasi odvijte klešče (smer ni pomembna). Zaradi počasnega zvijanja, vključno s premori, lahko klop izstopi sam.

Neustrezna uporaba/kontraindikacije za uporabo: vsaka druga uporaba ali uporaba, ki ni za predvideni namen, se šteje za neprimerno. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi takšne uporabe. V tem primeru vsa tveganja nosi samo uporabnik.

Dodatne informacije: če boste pinceto za odstranjevanje klopov pravilno uporabljali in hranili, vam bo zanesljivo služila več let.



Opozorila: pinceto hranite izven dosega majhnih otrok.. Nevarnost zaužitja majhnih delčkov! Pred uporabo pinceto Zecken-Fix razkužite z alkoholom ali očistite z drugim razkužilom, da preprečite (vključno z malo verjetno) okužbo pincete za odstranjevanje klopov. Odstranjevanje klopa naj izvajajo samo odrasle osebe.

Če po poskusu odstranitve klopa del klopa ostane v koži, se posvetujte z zdravnikom.

Zdravniški nasvet: ugrizi klopotov so lahko povezani z nevarnimi osnovnimi zdravstvenimi težavami. Zato se v primeru ugriza klopa posvetujte z zdravnikom. Na znanih ogroženih območjih je zelo priporočljivo preventivno cepljenje proti spomladansko-poletnemu meningoenkefalitisu. Če vas ugrizne klop in se okrog njega pojavi tavažoča in rdečica, ki se širi, se takoj posvetujte z zdravnikom.

Po odstranitvi klopa je treba mesto ugriza nujno razkužiti. To lahko storite z razkužili na osnovi alkohola, kot je Sterillium®.

Omejitve pri ponovni obdelavi: v primeru razpok ali lomljivih delov je treba izdelek zavreči.

Skladiščenje in transport: med skladiščenjem in transportom je treba instrument zaščititi pred prahom, vlago in kontaminacijo. Da preprečite kontaminacijo in prah, pinceto za odstranjevanje klopotov shranjujte le v embalaži.

Priprava na čiščenje: takoj po uporabi grobo umazanijo obrišite z vlažno krpo.

Ročno čiščenje/razkuževanje: površinsko specifična razkužila ali čistila, kot je čisti alkohol ali Helipur.

Avtomatično čiščenje: pred čiščenjem je treba pinceto razstaviti na sestavne dele (pinceta, vzmet, ročaj).

- Čiščenje: 55 °C / 10 min
- Predčiščenje in vmesno izpiranje: 1 min
- Potrjeno z napravo za čiščenje in razkuževanje: Miele PG 8582, tehnika splakovanja: sveža voda
- Priporočen detergent: Dr. Weigert neodisher MediClean forte (odmerjanje: 0,2% -1,0%)



Avtomatično razkuževanje: pred čiščenjem je treba pinceto razstaviti na sestavne dele (pinceta, vzmet, ročaj).

- Čiščenje: 55 °C / 10 min
- Predčiščenje in vmesno izpiranje: 1 min
- Dezinfekcija: 90 °C / 5 min
- Nazivna vrednost A_0 : vsaj 3000 s
- Potrjeno z napravo za čiščenje in razkuževanje: Miele PG 8582, tehnika splakovanja: sveža voda/voda brez mineralnih soli
- Priporočen detergent: Dr. Weigert neodisher MediClean forte (odmerjanje: 0,2% -1,0%)

Sterilizacija:

- Parna sterilizacija: 134 °C / 4 min
- Čas sušenja: 15 min
- Potrjeno: Mocom Autoklav B22

Vzdrževanje: vzdrževanje ni potrebno.

Pregled in preverjanje delovanja: preverite, ali se gibljivi deli, kot so prijemalne roke, lahko prosto premikajo. Če je izdelek poškodovan ali obrabljen, ga morate zavreči.

Splošni dodatki: za dodatne informacije o teh izdelkih obiščite našo spletno stran: **www.kawemed.com**.

Odstranjevanje: pinceta je izdelana iz nerjavečega jekla (ročaj + tlačna vzmet) in plastike (ročaj). Izdelek lahko praviloma odvržete med gospodinjske odpadke. Upoštevajte lokalne predpise!

Garancija: ob pravilni uporabi in upoštevanju naših navodil za uporabo nudimo garancijo 2 leti od datuma prodaje, če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na vašega prodajalca!

Kontaktne podatke proizvajalca: naslov ali telefonska številka trgovca ali podatki po telefonu: +49-7141-68188-0.

ID izdelka (UDI-DI): 4030155KaWe1102Z2

Razlaga simbolov:

	Proizvajalec in datum izdelave		Upoštevajte navodila za uporabo
	Številka artikla		Oznaka CE
	Šifra serije		Pozor!
	Medicinski izdelek		UDI nosilec podatkov

Informacije za uporabnike in bolnike

Vse resne incidente, povezane z napravo, je treba nemudoma prijaviti proizvajalcu in pristojnim organom ustrezne države članice EU, v kateri prebiva uporabnik in/ali bolnik.

 Vsi podatki so posredovani brez obveznosti - Pridržujemo si pravico do sprememb.



KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG
Eberhardstr. 56 • 71679 Asperg • Germany

Zentrale / Central office

Fon: +49 -7141-68188-0

Fax: +49 -7141-68188-11

Email: info@kawemed.de

Internet: www.kawemed.com